

OTIS Urethrotom (GG-619-00/-01/-02)

Zur Aufbereitung des Urethrotoms muss das Messer entfernt sein. Dazu das Messer am Griffstück ganz aus dem Führungskanal herauszuziehen:

1. Das Instrument muss geöffnet werden. Dies geschieht durch Drehen der Stellschraube (4) nach rechts.
2. Die Messerklinge (6) aus dem Führungskanal entfernen.
3. Dazu den Schaft (7) leicht andrücken (a).
4. Messer am Griff (8) halten und die Klinge (6) sowie den Schaft (7) aus dem Führungskanal (2) schieben.
5. Den Schaft aus der Messerführung führen.
6. Das Instrument ist demontiert.

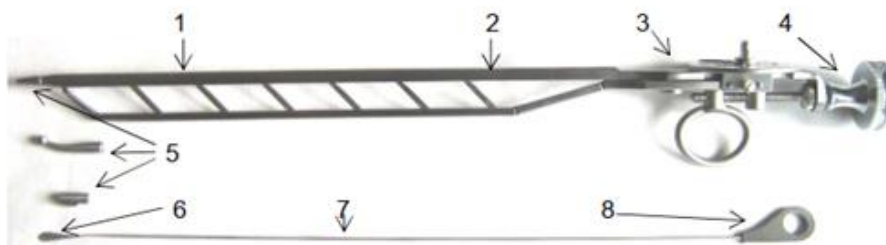


Abb.1
 1 = Schaft
 2 = Führungskanal für Messer
 3 = Skala Maßeinteilung Charrier
 4 = Stellschraube
 5 = Ansätze demontier-/ tauschbar
 6 = Messerklinge
 7 = Messerschaft
 8 = Messergriff

Abb.1

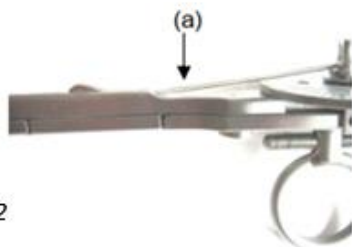


Abb.2



Abb.3