


TEBBETS Endo Retractor (HG-311-02 bis -72)

1. Das Instrument von oben betrachten und den Stab aus seiner Sicherung lösen.

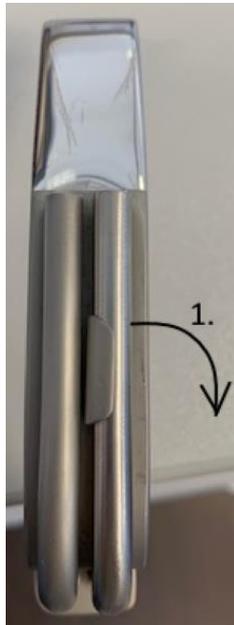

2. Den Stab aus dem Retraktor ziehen.



3. Den unteren Teil des Endes des Instruments lösen, indem dieser gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.



4. Den oberen Teil des Endes des Instruments lösen, indem dieser gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.



5. Das Instrument ist demontiert.

